


MASQUE NASO-BUCCAL DREAMWEAR

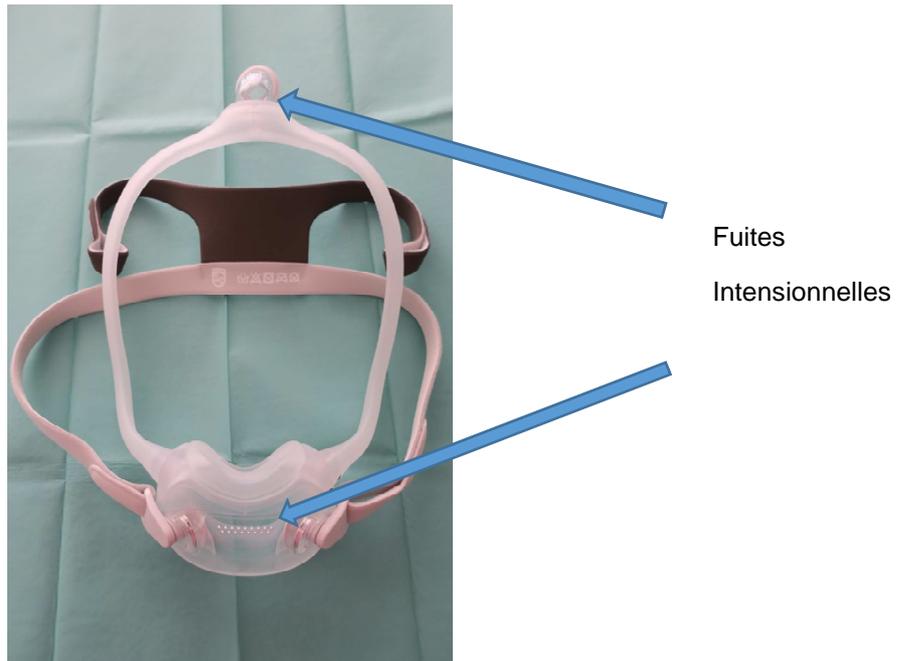


Il s'agit d'un masque à fuites. Il existe en 3 tailles : S, M et L et 2 tailles de sangles en silicone S/M (petite) et Med (moyenne).

Le masque est composé de 4 éléments :



Montage du masque :
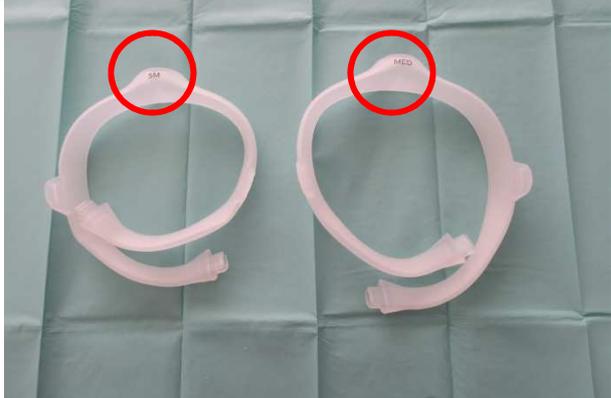
| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>1. Adapter la sangle en silicone à l'interface</p> | <p>2. Adapter l'embout transparent à la sangle en silicone</p> |
|  |  |
| <p>3. Adapter la sangle au masque</p> | <p>Attention il y a deux tailles de sangle en silicone</p> |

Ces 4 éléments sont démontables lors de la décontamination et se remontent après le **séchage complet**.

Attention : Ne pas jeter l'embout transparent avec le circuit jetable.