

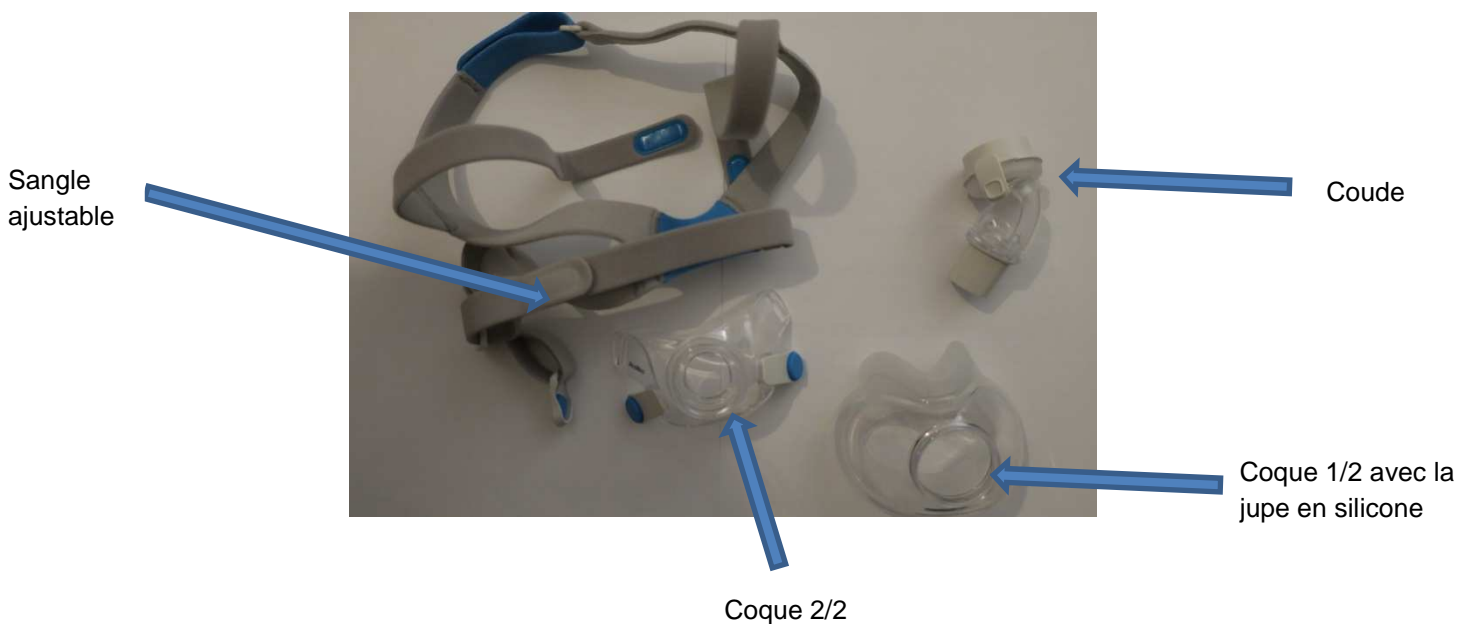
MASQUE NASO-BUCCAL F30 AIRFIT





Fuites
Intentionnelles

Il s'agit d'un masque à fuites. Il existe en 3 tailles : S et M.

Le masque est composé de 4 éléments :



Montage du masque :

	
<p>1. Adapter la coque 1/2 (avec la jupe en silicone) à la coque 2/2 puis clipser le coude au masque</p>	<p>2. Mettre la sangle sur le masque monté</p>

Ces 4 éléments sont démontables lors de la décontamination et se remontent après le **séchage complet**.

Si on veut changer la taille du masque, il est possible de changer juste l'interface et non le masque entier.