

## MASQUE NASO-BUCCAL SIMPLUS FISCHER & PACKER




Fuites  
Intentionnelles

Il s'agit d'un masque à fuites. Il existe en 3 tailles : S, M et L

**Attention :** le coude gris reste souvent encastré dans le circuit, faire attention de ne pas le jeter

### Le masque est composé de 3 éléments :

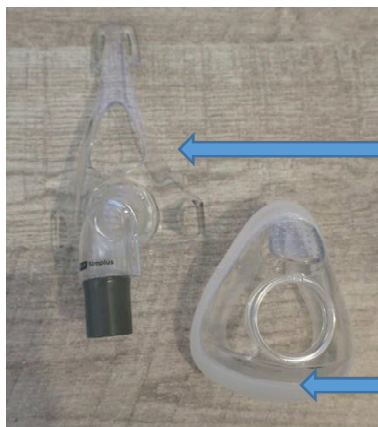

Coque avec le  
coude amovible

Jupe en  
silicone



Sangle  
ajustable

**Montage du masque :**

	
<p>1. Adapter la coque du masque à la jupe</p>	<p>2. Mettre la sangle sur le masque monté</p>

Ces 3 éléments sont démontables lors de la décontamination et se remontent après le **séchage complet**.